


FICHA TÉCNICA
DuoDERM® Gel

Nome Genérico	Gel hidroativo
Nome Comercial	DuoDERM® Gel
Imagem	
Descrição	<p>DuoDERM®Gel é um produto estéril*, em forma de gel. DuoDERM®Gel cria um ambiente cicatricial úmido que favorece o processo de cicatrização.</p> <p>*Processo de esterilização: Autoclavagem.</p>
Marca	DuoDERM® ConvaTec®
Fabricante	<p>ConvaTec Inc. – Estados Unidos</p> <p>ConvaTec Limited – Reino Unido</p>
Composição do Produto	Substâncias Hidrocolóides: Carboximetilcelulose Sódica, Pectina; Água 81.5% p/p e Propilenoglicol.
Características e Ações do Produto	<ul style="list-style-type: none"> • Promove hidratação do tecido seco: penetrando no leito da ferida, hidratando e favorecendo o desbridamento autolítico (remoção de tecido necrótico de forma natural e seletiva). • Mantém o ambiente úmido: favorece a promoção e formação de tecido de granulação. • Mantém o pH ligeiramente ácido (5,0 a 6,0): reduz o risco de infecção através do aumento da atividade de macrófagos no controle do crescimento bacteriano. • Absorve e proporciona umidade: Como um gel amorfo tem a capacidade de absorver e proporcionar a umidade de acordo com a necessidade da ferida.
Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</p> <p>DuoDERM®Gel é indicado para o tratamento de feridas de profundidade média ou total, tais como úlcera por pressão, úlcera de perna e úlcera diabética.</p> <p>Cuidados na aplicação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpar cuidadosamente a ferida com água estéril, solução salina ou com algum dos agentes de limpeza de uso comum na prática hospitalar. Secar a pele adjacente. • Desenroskar a tampa do tubo, retirar o anel de segurança branco e descartá-lo. • Recolocar a tampa a fim de perfurar o tubo.

	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar DuoDERM®Gel diretamente dentro da ferida. Não exceder o nível da pele ao redor da ferida. 			
Cuidados de Conservação	Armazenar até 25° graus evitando refrigeração.			
Registro Sanitário	Registro ANVISA 80523020006			
NCM	3005.90.90			
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Característica	Unidades por Caixa
187990	1197969	265826	Tubo com 15 gramas - Gel	10
187987	1197970	265828	Tubo com 30 gramas - Gel	3