


FICHA TÉCNICA
KALTOSTAT® FORTEX Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio

Nome Genérico	Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio
Nome Comercial	Kaltostat® Fortex Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio
Imagem	
Descrição	Kaltostat® Fortex é um curativo estéril, de não tecido de fibras de alginato de cálcio e sódio, macio, de cor branca a quase branca, em formato de placa ou fita. As fibras de alginato absorvem o exsudato da ferida e transformam-se em uma camada firme de gel.
Marca	Kaltostat® ConvaTec®
Fabricante	ConvaTec Inc. – Estados Unidos ConvaTec Limited – Reino Unido
Composição do Produto	Fibras de alginato de cálcio e sódio. Processo de esterilização: radiação gama
Características e Ações do Produto	<ul style="list-style-type: none"> • O curativo Kaltostat® Fortex é um curativo externo projetado para absorver o exsudato, controlar pequenas hemorragias e proteger a ferida de contaminação. • Kaltostat® Fortex promove um ambiente úmido que facilita a cicatrização de feridas. • O gel forma um ambiente úmido na interface com a ferida, e permite a remoção sem trauma, praticamente sem danos para o tecido recém formado. • Em contato com uma ferida hemorrágica, as fibras de alginato de cálcio e sódio promovem hemostasia.
Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaltostat® é um curativo primário que deve ser utilizado com um curativo secundário de cobertura. • Dependendo das características da lesão o curativo pode permanecer no lugar até 7 dias. • Este produto é de uso único e estéril, qualquer porção não utilizada do curativo após abertura da embalagem deve ser descartada. • Kaltostat® pode ser utilizado em: pequenas abrasões, pequenas lacerações e queimaduras superficiais. Sob a supervisão de um profissional de saúde: úlceras por pressão, úlceras de estase venosa, úlceras arteriais, úlceras diabéticas, áreas doadoras, incisões pós-cirúrgicas e feridas externas causadas por trauma.

	<ul style="list-style-type: none"> Outras indicações: manejo local de feridas hemorrágicas: lacerações, abrasões, sangramento de nariz, extração de dentes e após desbridamento cirúrgico; absorção de exsudato em feridas oncológicas, tais como tumores cutâneos fungóides, carcinoma fungóide, metástases cutâneas e Sarcoma de Kaposi. 										
Cuidados de Conservação	Armazenar entre 10 e 25°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada. Proteger da luz.										
Registro Sanitário	Registro ANVISA Nº 80523020003										
NCM	3005.90.90										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código ICC</th> <th>Brasíndice</th> <th>SIMPRO</th> <th>Característica</th> <th>Unidades por Caixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>168356</td> <td>1197986</td> <td>265728</td> <td>10 x 10 cm</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Característica	Unidades por Caixa	168356	1197986	265728	10 x 10 cm	10
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Característica	Unidades por Caixa							
168356	1197986	265728	10 x 10 cm	10							